



Engagements qualité

Fabriqué en France



CATALOGUE HOLTER SUPPLIES

Ayez un temps d'avance!

1949



1983



Aujourd'hui



Enregistreur Holter

miniaturisé et performant
Enregistrement continu de l'ECG



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

communes à tous les enregistreurs Holter

Taille	Se porte autour du cou 41 x 65 x 14,5mm
Ecran	OLED pour un fort contraste
Poids	28g (sans pile)
Fréquence d'échantillonnage	selon le câble, 250Hz (adulte et pédiatrie) ou 1000Hz (pacemaker)
Mémoire	Mémoire flash interne (inamovible pour plus de fiabilité et de sécurité)
Energie	1 pile alcaline AAA pour 25 jours (ou pile lithium ou batterie)
Autres	Reconnaissance automatique des câbles ECG, transfert rapide des données par un câble USB. Connexion des électrodes mesurée en continu.

Référence :	AFT24-A	AFT1000_01-A	AFT1000-01-B
Durée * :	24h	1 à 10 jours	1 à 22 jours

* : paramétrage 2 voies 250Hz

Kit Holter

*incluant tous les accessoires
et consommables
indispensables pour
un démarrage immédiat*



COMPOSITION :

- ✓ 1 enregistreur AFT (24h, A ou B)
- ✓ 1 Logiciel d'analyse KLQ07
- ✓ 1 câble ECG 2 voies 3 fils
- ✓ 100 pochettes de protection
- ✓ 10 tours du cou
- ✓ 1 câble USB
- ✓ guides d'utilisation

Offert : la mallette de rangement


Référence :	KTH_00-24	KTH_00-A	KTH_00-B
Durée * :	24h	1 à 10 jours	1 à 22 jours

* : paramétrage 2 voies 250Hz

Câbles ECG


Composition : externe : gaine renforcée (grise)

interne : fils spiralés multibrins entourant des fibres de Kevlar

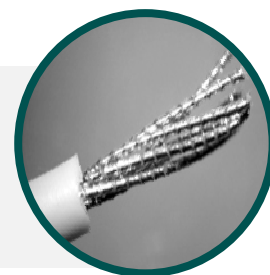

Nom	Utilisation	Référence
Câbles 2 voies		
Câble ECG 2 voies 3 fils 250Hz	Deux voies avec une électrode commune	RFT00-2L3-250
Câble ECG 2 voies 3 fils 250Hz/1000Hz	Idem+commutables en 250 ou 1000Hz pour PM	RFT00-2L3-1000
Câble ECG 2 voies 5 fils 250/1000Hz	Deux voies indépendantes, commutables en 250 ou 1000Hz pour PM	RFT00-2L5-1000
Câbles 3 voies		
Câble ECG 3 voies 4 fils 250Hz	3 voies avec deux électrodes communes	RFT00-3L4-250
Câble ECG 3 voies 7 fils 250/1000Hz	3 voies indépendantes commutables en 250 ou 1000Hz	RFT00-3L7-1000
Câbles spéciaux		
Câble ECG 2 voies 3 fils 250Hz spécial Brugada	Pour le recueil de deux dérivations V1, V2 spécifiques au syndrome de Brugada	RFT10-2L3-250
Câble ECG 3 voies 7 fils 250/1000Hz Pour vectocardiogramme	Enregistrement vectocardiogramme en 250 ou 1000Hz.	RVT00-3L7-1000



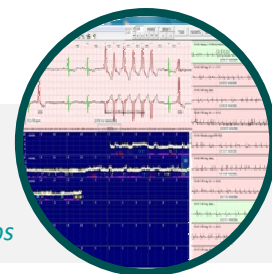

Logiciel d'analyse Quick Reader

Conçu pour analyser les tracés ECG de manière efficace et précise*.

Ses fonctions pour reclasser en masse les complexes et ses raccourcis claviers vous feront gagner du temps

Nom	Utilisation	Références
Fonctions basiques		
Dongle Holter Standard (Impression+Rythme+ST)	Analyse du signal, analyse du rythme, analyse du ST, édition et corrections des familles, des événements, histogrammes, rédaction conclusion, impression du rapport général.	KLQ-07-A
Dongle Holter Standard + Stimulateur	Idem +un programme de recherche des spikes sur l'ECG et classification automatique des QRS entraînés. Analyse des modes de fonctionnement et des intervalles spikes-spikes (rythme spontané, mono ou double chambre).	KLQ-15-A
Dongle à Jetons	Alternative à la licence permanente, avec les mêmes possibilités d'analyse. Pour chaque nouveau patient analysé, le stock de jetons est réduit d'une unité.	KLQ-XX-J
Licence Holter	Autorise le fonctionnement du logiciel sans dongle sur un ordinateur. Options identiques aux versions à Dongle. Appelez nous pour licences multi-utilisateurs.	KLQ-0700 KLQ-1500

Options complémentaires

Option Variabilité sinusale	Calcul de la Variabilité sinusale en mode fréquentiel dans la bande de fréquence de 0,00 à 0,5Hz. cumul des valeurs de VLF, LF et HF. La période analysée peut être choisie de 15' à la durée de l'enregistrement. Impression des résultats à la demande.	KLQ-10-A
Option Analyse P et QT	Fournit les courbes f(t) des intervalles PR et QT (si l'amplitude des ondes est suffisante), de l'amplitude des ondes P et T, et les graphiques PR/RR et QT/RR + droite de régression. Période analysée : de 15' à la durée totale. Possibilité d'impression des résultats.	KLQ-20-A
Option Exportation résultats	Exporte les résultats de l'analyse de rythme vers des bases de données.	KLQ-40-A
Option Respiration et détection apnées	Analyse le flux respiratoire, la fréquence respiratoire, le niveau de ronflement et les apnées. Impression d'un rapport donnant l'Index Apnéique (moyenne, max, durée, et heure par heure). L'enregistrement doit être fait avec le câble RXT00-2L3-250	KLQ-80-A
Option Sécurité avec Administrateur	Accès au programme protégé par un mot de passe et opérations contrôlées.	KLQ-100-A

Utilisation en réseaux *Utilisé lorsque les postes de lecture sont éclatés géographiquement. Travaillez en tous lieux !*

Dongle Master	Dédié au poste principal, en général celui sur lequel on transfère les fichiers.	KLQ-015-E
Dongle Esclave (1 jeton=1 analyse)	Dédié à un ou plusieurs postes secondaires. Les fichiers patients peuvent être récupérés par le réseau et les résultats d'analyse sur le master. <i>Le dongle esclave fonctionne comme le dongle à jetons. Dès que la réserve de jetons est épuisée, l'utilisateur peut aller le recharger sur le poste principal.</i>	KLQ-015-M

*Pré-requis techniques

[Fonctionne sous Windows® (XP, Vista, 7-> 10) sur un PC. Le programme d'installation (Setup) est présent dans l'enregistreur AFT. Une fois l'enregistreur branché, cliquez sur AFT puis allez dans le dossier "Quick Reader" et lancez le set up. Le logiciel fonctionne avec un "dongle" qui est une clé USB donnant accès aux fonctionnalités du logiciel. Sans dongle, vous n'accédez qu'aux fonctions basiques : transfert des données de l'AFT1000 et visualisation de l'ECG. Nous vous conseillons de le mettre régulièrement à jour (gratuit).]



Accessoires



Nom

Utilisation

Référence

Accessoires indispensables

Pochettes jetables (x100)	Obligatoire pour protéger l'appareil contre la sueur et pour des raisons d'hygiène. Accompagnées de 3 clips réutilisables.
Tours du cou ajustables (x10)	Pour fixer l'enregistreur dans sa pochette autour du cou. Réutilisables.
Tours du cou ajustables (x50)	Idem par 50
Câble USB	Connecte l'enregistreur au PC pour transférer le tracé ECG.

PCT03-100-B



PCT05-010-A

PCT05-050-A
RFU_00A

Accessoires supplémentaires

Ceinture à électrodes permanentes

Cette ceinture élastique à 3 électrodes en mousse de fil d'argent assure un excellent contact avec la peau (ajouter une seule goutte de gel ECG pour la conduction).

Pose : bien tendue autour du thorax, au dessus de la poitrine; réutilisable, lavable.

La légère tension de la ceinture plaque les électrodes sur la peau sans nécessiter d'adhésif. *Idéal pour l'enregistrement des Holter : long terme, sportif (non gêné par la transpiration), peau irritable ou fragile (pédiatrie)...*

BLT01-01-A

Clips complémentaires (x10)
Clips complémentaires (x100)
Mini-mallette

Pour fermeture pochettes

Mallette à compartiments pour le rangement des accessoires du Holter (de 1 à 2 enregistreurs). Contient un guide de rappel du positionnement des électrodes.

PCT07-010-B

PCT07-100-B
MMLT01

Testeur de câbles ECG seul

Sert à vérifier l'état des câbles. On utilise la mesure d'impédance de l'enregistreur.

TCB00-04-A



Étiquettes effaçables (x50)

Permet d'écrire au stylo le nom du patient sur le holter

ETQAFT-050-A

Stylo noir PILOT Friction

Stylo effaçable

PILOTFRN

Électrodes micropore spécial Holter (x50)

Électrodes de très bonne tenue, signal de haute qualité, faible irritation cutanée

ELT00-50-A



Les photos ne sont pas contractuelles : les modèles peuvent évoluer et ne pas correspondre exactement aux photos indiquées.

CE
0459