



GUIDE de l'AFT LIGHT (v.1.00A)

PREPARATION :

Chargez la batterie en branchant un câble USB au PC ou à un chargeur USB. Le voyant orange clignote.

En fin de charge, le voyant vert reste allumé en permanence.

Vous pouvez également enregistrer le nom du patient avec Quick Reader. En appuyant sur le bouton après l'écriture du fichier, la date et l'heure du PC sont aussi transférées à l'enregistreur. Confirmé par un clignotement Orange-vert.



Retirer le câble et bien fermer le bouchon USB.


Placer 3 électrodes à pression déportées sur l'enregistreur :




Retirer la protection anti-adhésif des électrodes.

POSE :

Nettoyer et frotter légèrement la peau aux endroits où vont se poser les électrodes :

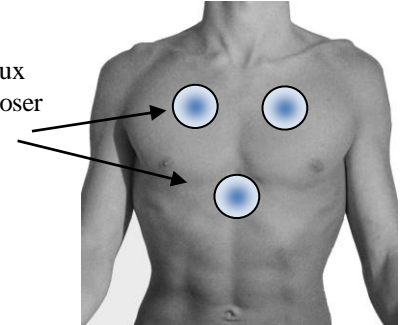

Demander au patient d'inspirer profondément et plaquer les 3 électrodes sur son thorax.

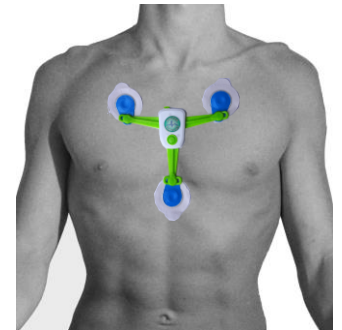

Mettre en route en appuyant sur le bouton plus de 5 secondes

jusqu'à ce que le voyant vert s'allume, puis clignote pendant le contrôle de la mémoire et l'effacement de l'enregistrement précédent.

ENREGISTREMENT

Lorsque les 3 électrodes sont bien en place, le voyant vert flash toutes les 5 secondes environ.

Si une électrode est mal collée, c'est le voyant orange qui flashe. Il faut alors la recoller et éventuellement la changer.

L'appareil n'est pas encore totalement étanche, et il ne faut pas prendre de douche ou de bain avec. Il suffit de le déconnecter des électrodes pendant ce temps et de le reconnecter après.

Si une douleur survient ou si le patient souhaite indiquer un événement particulier, il peut appuyer sur le bouton : le voyant vert clignote alors 5 fois pour montrer que l'appui est bien pris en compte.




RETOUR ET TRANSFERT

L'enregistreur s'arrête lorsque l'on branche la prise USB, ou si sa mémoire est pleine (après 10 jours).



Récupérer les données avec Quick Reader et lancer l'analyse en local ou envoyer les données à analyser à votre Holtériste.

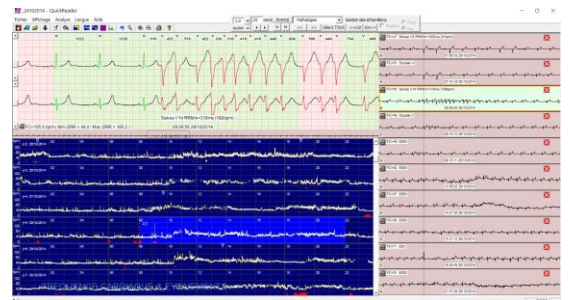

ANATOMIE DE L'AFT LIGHT

